

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書に記載されている使用方法、注意事項およびプリンター本体の取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

⚠【使用上のご注意】

- ・装着部分に皮膚障害や傷などがある場合には、使用しないでください。
- ・皮膚が極端に弱い方には使用しないでください。
- ・通気性を確保するため、指2本分以上の余裕を持って装着してください。
- ・使用中および装着される方の体質（アレルギーや過敏症）、使用箇所によっては湿疹、かぶれなどの皮膚異常が見られる場合があります。
- ・そのような症状が見られた場合にはただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・特に新生児に使用する場合、皮膚の状態を確認しながらご使用ください。
- ・MRI 検査時は、発汗などによりリストバンド装着部分に熱を感じる可能性があります。リストバンドと皮膚が直接触れないよう、乾燥したタオルやガーゼなどを挟んでください。
- ・使用中は、1日に1～2回程度皮膚の状態を確認しながらご使用ください。
- ・長期にわたり連続使用する場合には、リストバンドの汚れや破損、印刷内容の状態を確認し、適宜に新しいものにお取替えてください。
- ・一度固定したスナップは無理にあげないでください。指や爪などをケガする危険があります。
- ・また一度固定して使用したスナップは再使用できませんので使用しないでください。
- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・口に入れたり、目などの粘膜に直接触れないようにご注意ください。
- ・安全のため、強い力で引っ張ると切れます。また、衣類や硬い物に引っ掛けないようご注意ください。
- ・本製品は、TM-C3400 シリーズプリンター（ファームウェア：Ver.WSN00170以降、プリンタードライバー：Ver.1.2.0.0以降）および TM-C3500/CW-C4000 シリーズプリンター専用品としてご使用ください。


【推奨印刷設定】

印刷設定：	TM-C3400シリーズ	TM-C3500シリーズ	CW-C4000シリーズ
用紙種類	リストバンドタイプ2	リストバンド	リストバンド用紙
給紙方法	ロール紙	ロール紙	ロール紙
用紙検出位置	連続紙のブラックマークを検出する	ブラックマーク連続紙	ブラックマーク検出
用紙形態	ブラックマークレシート	連続紙(ブラックマーク基準)	リストバンド(ブラックマーク検出)


印刷領域：下図の斜線領域におさまるように印刷する情報を配置してください。

＜注意：印刷領域外には印刷しないでください。プリンターの内部が汚れたり故障するおそれがあります。＞


WB-L シリーズ

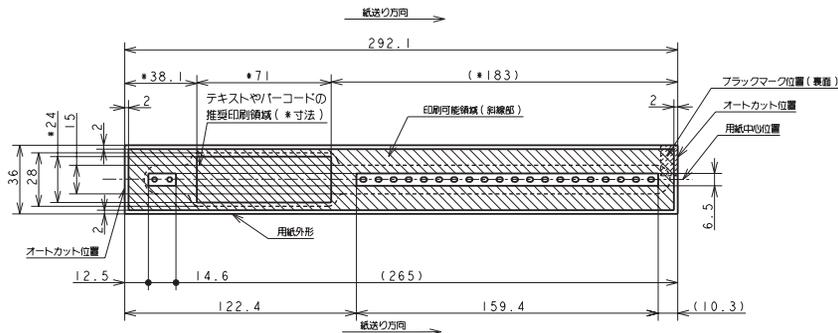

WB-M シリーズ

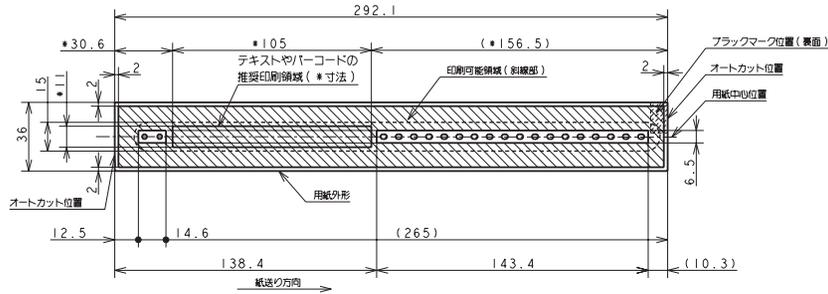

WB-S シリーズ

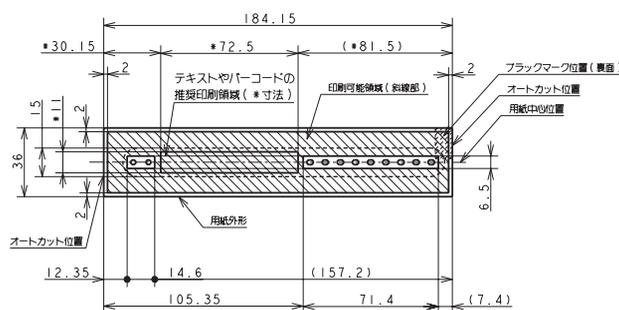


[単位 mm]
[数値は設計中心値を示す。]

【ご使用方法】

1. リストバンド用のアタッチメントをプリンターに取り付けます。
＜注意：取り付け方法は、アタッチメントの取扱説明書をお読みください。＞
2. リストバンドの端に留めてあるラベルを切って使用できる状態にします。
なお外周 1 周分は保護用としてあらかじめ余分に巻いてありますので使用しないでください。
＜注意：端に留めてあるラベルを無理にはがして使用すると、リストバンドがはがれたり糊が印刷面に残りプリンターに不具合が発生する場合があります。＞
3. リストバンドをプリンターにセットします。
＜注意：セット方法は、プリンターの取扱説明書（ユーザズマニュアル）をお読みください。＞
4. 必要な情報を印刷します。
＜注意：プリンターの印刷設定は「推奨印刷設定」の項目を参照してください。＞
5. 印刷されたリストバンドを取り、左右に引っ張り縁から切り離してください。




6. リストバンドの2つ孔（片端）にスナップの「ピン」を根元まで差し込んでください。

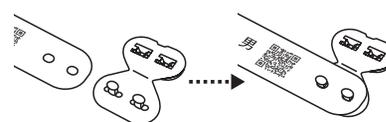


7. その状態で装着する部分に巻きつけて、適当なすき間（目安として指 1～2 本が入る程度の余裕）が取れる長さに設定してからスナップの「ピン」を孔の根元まで差し込んでしっかりと閉じて固定してください。

＜注意：きつく締めすぎた場合にはムレや皮膚異常の原因となります。
通気を確保してご使用ください。＞

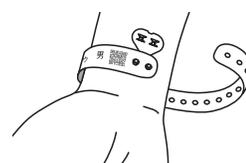


8. スナップを閉じた後、リストバンドの端を引っ張り、スナップが確実に固定されていることを確認してください。

＜注意：固定されていない場合には、再度各孔にスナップの「ピン」を差し込んで固定してください。＞

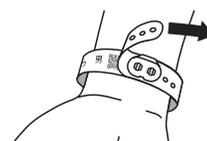

9. 余分なリストバンドは、ハサミ等を使って切り取ってください。

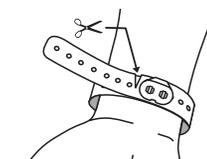


【ご使用后】

ご使用後に不要となったリストバンドは、ハサミ等を使って切ってください。

＜注意：皮膚を傷つけないようにご注意ください。＞

＜注意：固定したスナップを無理に開けないでください。

指や爪などをケガする危険があります。＞

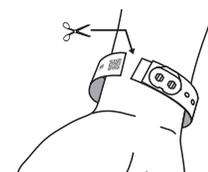

【製品材質】

製品名	材質
リストバンド	PET+PE
スナップ	PE

本製品のリストバンド、スナップは抗菌仕様です。
パッチテスト（閉鎖式皮膚貼付試験）実施済みです。

【保管について】

直射日光が当たる所や高温多湿になるような所には保管しないでください。
開封後は個装箱に入れて冷暗所に保管してください。